

Методика фонирувания при ОРВИ

Для аппаратов серии Витафон, Витафон-Т

Виброфоны последовательно ставятся сначала на область К, потом на область – М4

День	Область воздействия, режим, время		Общее время (мин)
	К	М4	
	Режим 2	Режим 2	
1-2	5	5	10
3-4	10	10	20
5-6	15	15	30
7-8	20	15	35
далее	25	15	40

Для аппарата Витафон-2

Две пары виброфонов ставятся сразу на 2 области, что позволяет за более короткое время пройти усиленную методику и оказать воздействие на три области (К, М4, М).

День	Режим	Область, энергия, время фонирувания (мин)				Общее время (мин)
		К	Энергия 3	К	Энергия 3	
		М4	Энергия 2	М	Энергия 2	
1	Реж.1	5		5		10
2	Реж.1	10		5		15
3	Реж.2	15		5		20
4	Реж.2	15		10		25
далее	Реж.2	15		10		25

Для аппарата Витафон-5

●● – виброфоны с зеленой маркировкой; ○○ – виброфоны с белой маркировкой.

Две пары виброфонов ставятся сразу на 2 области, что позволяет за более короткое время пройти усиленную методику и оказать воздействие на три области (К, М4, М).

День	Режим	Область, цвет виброфонов, время (мин)				Общее время (мин)
		К	●●	К	●●	
		М4	●●	М	○○	
1	Реж.1	5		5		10
2	Реж.2	10		5		15
3	Реж.3	15		5		20
4	Реж.4	15		10		25
далее	Реж.5 или Реж. 0	15		10		25